

Fios de Localização Mamária Bard

# Guiando o caminho

Versatilidade

Simplicidade

Estabilidade




**BARD**

SISTEMAS DE BIÓPSIA

# Seguindo em frente com o que há de mais inovador em localização mamária

Com inovações tais como posicionamento com uma só mão, possibilidade de reposicionamento e dupla haste, os Sistemas para Biópsia Bard são fáceis de usar, precisos e apresentam estabilidade nos Fios de Localização Mamária

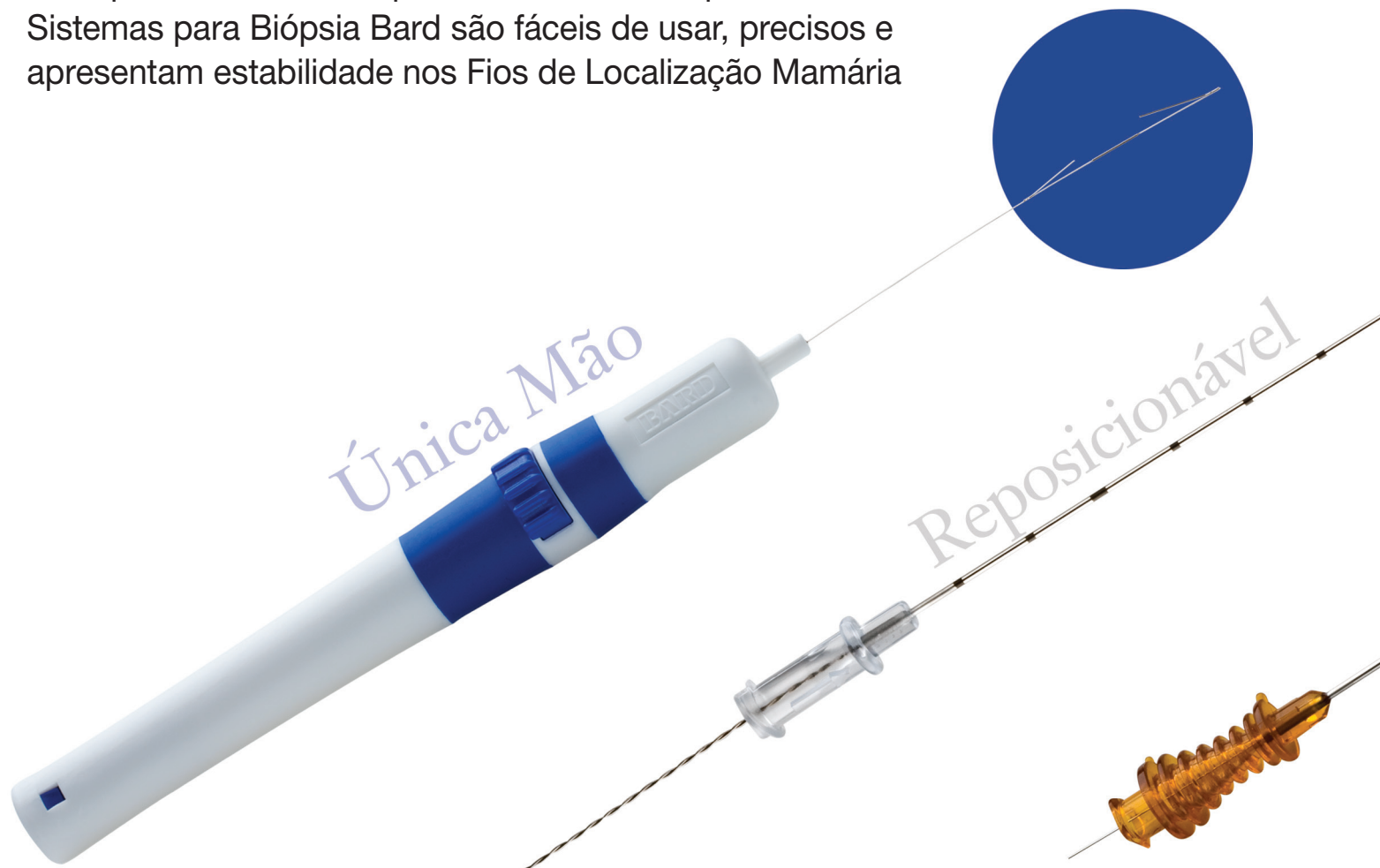

## ULTRAWIRE® One-Handed Dispositivo de Localização Mamária


Esse dispositivo único, para manuseio com uma só mão, foi projetado para facilitar o uso, rapidez e segurança nos procedimentos de localização orientados por ultrassom. Seu desenho com fio pré-carregado permite o posicionamento do fio com uma só mão, enquanto a outra mão segura o transdutor do ultrassom, permitindo uma produção contínua de imagem e precisão na colocação.

- Desenho do fio pré-carregado
- Agulha de segurança: retraída após uso
- Dupla haste do fio minimiza a movimentação
- Ponta ecogênica da agulha

## DUALOK® Fio de Localização Mamária

Projetado para ser fixado em local seguro e removido por reposicionamento, esse dispositivo proporciona resistência superior à migração e permite o reposicionamento após a colocação.

- Elementos de trava curvados proporcionam resistência superior à migração
- Construção resistente do fio por ser torcido

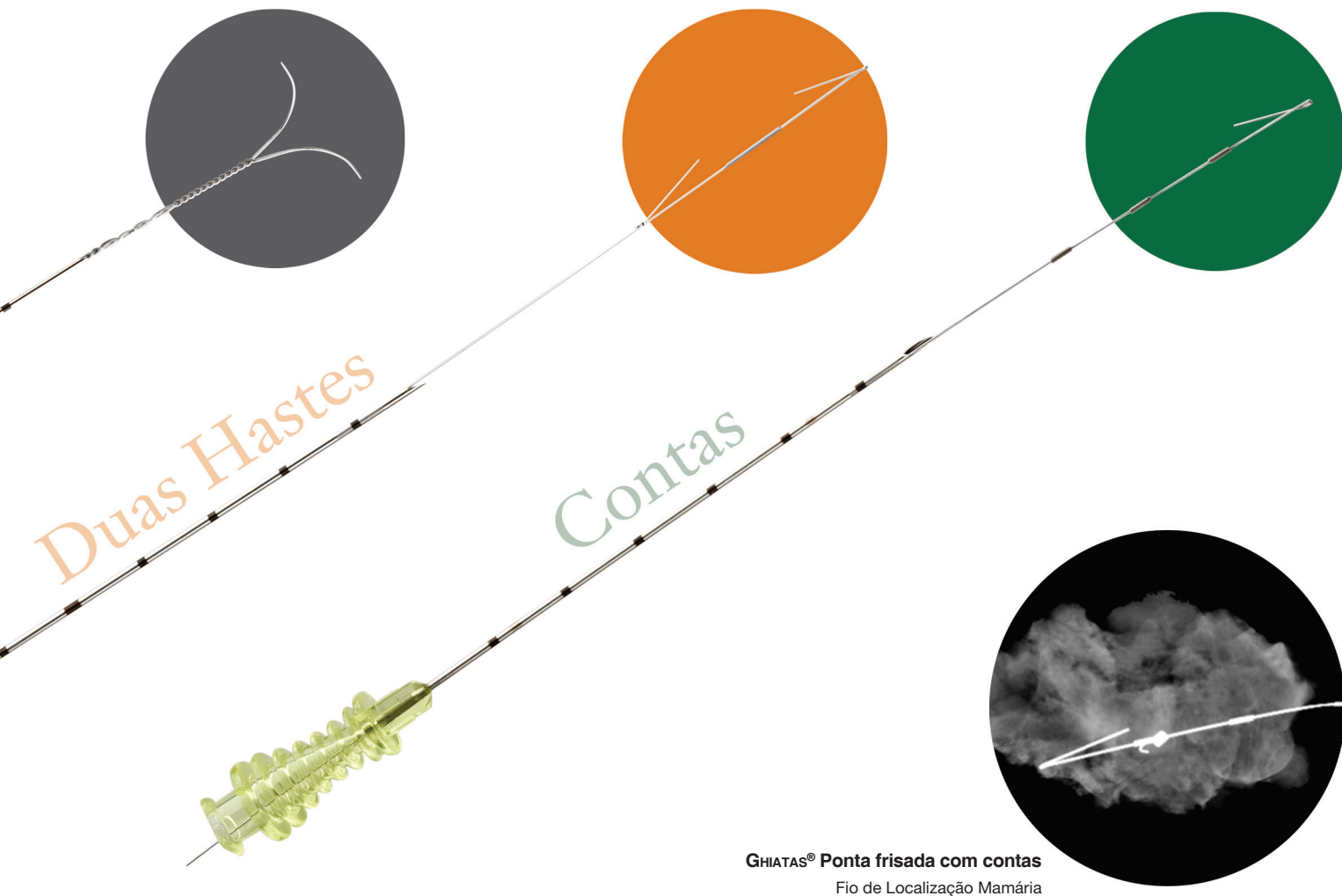

**GHIATAS® Ponta frisada com contas**  
Fio de Localização Mamária

### **CHESBROUGH®** Fio de Localização Mamária

Esse fio único incorpora o que há de mais inovador em Fios de Localização Mamária: dupla haste projetada para minimizar a migração após colocação.

- O posicionamento da parte frisada com contas oferece ponto de referência palpável para auxiliar na colocação do fio
- As contas entre a dupla haste oferecem referência visual e palpável

### **GHIATAS® Ponta frisada com contas** Fio de Localização Mamária

As contas colocadas em intervalos de 1 cm neste fio produzem uma referência visual rápida da lesão e proporcionam excelente ponto de referência palpável para o cirurgião.

- Versões compatíveis com RM disponíveis
- O posicionamento da parte frisada com contas oferece ponto de referência palpável para auxiliar na colocação do fio
- Também disponível em seção rígida

# Informações de Produtos

## BARD® ULTRA WIRE® Dispositivo de localização mamária para manuseio com uma só mão

Código do Produto	Agulha Introdutora Calibre x Comprimento	Fios de Localização
300519	19g x 5cm	19cm
300719	19g x 7cm	21cm
300919	19g x 9cm	23cm

## BARD® CHESBROUGH® Fio De Localização Mamária

Código do Produto	Agulha Introdutora Calibre x Comprimento	Fios de Localização
460519	19g x 5cm	15cm
460719	19g x 7cm	20cm
460919	19g x 9cm	20cm

## BARD® DUALOK® Fio De Localização Mamária

Código do Produto	Calibre x Comprimento
LW0037	20g x 37mm
LW0057	20g x 57mm
LW0077	20g x 77mm
LW0107	20g x 107mm
LW0137	20g x 137mm

## GHIATAS® Ponta frisada com contas, Fio de localização mamária

Código do produto	Agulha introdutora Calibre x Comprimento	Fios de localização
47320	20g x 3cm	15cm
47520	20g x 5cm	15cm
47720	20g x 7cm	20cm
47920	20g x 9cm	20cm
47020	20g x 14cm	35cm
47519	19g x 5cm	15cm
47919	19g x 9cm	20cm

## GHIATAS® Ponta frisada com contas, Fio de localização mamária para RM

Código do produto	Agulha introdutora Calibre x Comprimento	Fios de localização
475201	20g x 5cm	15cm
477201	20g x 7cm	20cm
479201	20g x 9cm	20cm
470201	20g x 14cm	35cm

## BARD® GHIATAS® Fio de localização mamária frisado com contas com seção rígida

Código do produto	Agulha introdutora Calibre x Comprimento	Fios de localização
49520	20g x 5cm	15cm
49720	20g x 7cm	20cm
49920	20g x 9cm	20cm

## BARD® Cânulas rígidas de ponta arredondada

Código do produto	Calibre x Comprimento
48500	20g x 5cm Cânula rígida arredondada
48700	20g x 7cm Cânula rígida arredondada
48900	20g x 9cm Cânula rígida arredondada

**INDICAÇÕES PARA USO:** Os Fios de localização mamária Bard® destinam-se a uso durante cirurgia de lesão mamária como guia para o cirurgião acompanhar a excisão da lesão.

**CONTRA INDICAÇÕES:** Nenhuma contra indicação conhecida.

**ADVERTÊNCIAS:** 1. Uma vez que as hastas tenham sido posicionadas na mama, o fio deve ser removido cirurgicamente. Não tentar reposicionar, mover ou puxar o fio para não causar dano/rompimento. (Isso não se aplica ao Fio de localização mamária Bard Dualok®) 2. O Fio é apenas um guia. NÃO utilizar como retrator. 3. Ter cuidado durante a excisão cirúrgica da lesão para evitar o corte do fio com o bisturi. 4. Ter cuidado ao utilizar quaisquer Fios de localização em pacientes com próteses mamárias para não perfurá-las durante a colocação ou transporte. 5 O fio deve ser avançado apenas através da agulha. Não tentar puxar o fio de volta para dentro ou para fora da agulha ou da haste para não gerar danos. (Isso não se aplica ao Fio de localização mamária Bard Dualok®) 6 Não tentar remodelar as hastas do cabo de forma alguma; isso pode romper as hastas. Se as hastas do fio estiverem deformadas ou incorretamente curvadas, descartar o produto. 7. Esse dispositivo foi projetado para uso único apenas. A reutilização desse dispositivo médio gera o risco de contaminação cruzada no paciente pois dispositivos médicos, particularmente aqueles com articulações longas e pequeno lúmen, e/ou fendas entre os componentes, são difíceis ou impossíveis de serem limpos, uma vez que fluidos corporais ou de tecidos com potencial para contaminação pirogênica ou microbiana entram em contato com o dispositivo médico durante período de tempo indeterminado. O resíduo de material biológico pode promover a contaminação pirogênica ou microbiana do dispositivo, que pode levar a complicações infecciosas. 8. Não re-esterilizar esse dispositivo. Após a re-esterilização, a esterilidade do produto não é garantida por causa de grau indeterminado de contaminação potencial pirogênica ou microbiana, que pode levar a complicações infecciosas. O processamento de limpeza e/ou de re-esterilização do presente dispositivo médico aumenta a probabilidade de mau funcionamento do dispositivo devido a efeitos adversos potenciais nos componentes que são influenciados por alterações térmicas e/ou mecânicas. NOTA: Após o uso, esse produto pode apresentar risco potencial à saúde. Manipular e descartar o dispositivo de acordo com a prática médica aceitável e de acordo com legislação e regulamentos locais, estaduais e federais aplicáveis.

**PRECAUÇÕES:** 1. Os Fios de Localização Mamária Bard® devem ser usados apenas por um médico treinado em relação ao uso indicado, limitações e possíveis complicações de técnicas percutâneas com agulha 2. A introdução do dispositivo no organismo deve ser feita sob controle de imagem (ultrassom ou raio x). 3. Antes de usar, inspecionar o dispositivo quanto a danos que possam impedir o devido funcionamento. NÃO UTILIZAR se os componentes estiverem danificados ou dobrados.

**COMPLICAÇÕES POTENCIAIS:** Complicações potenciais são específicas do local e podem consistir em hematoma, hemorragia, infecção, lesão em tecido adjacente, dor, sangramento, hemoptise, hemotórax, perfuração de tecido que não o alvo, de órgão ou de vaso e pneumotórax.

Por favor, consulte os rótulos do produto e bulas para informações de indicações, contra-indicações, riscos, advertências, precauções e instruções de uso.



## Bard Sistema de Biópsia: Dedicada a oferecer a você uma escolha sem compromisso

Com Bard Biopsy Systems estamos comprometidos em ajudá-lo no atendimento desde a biópsia da mama até a terapia, sem compromisso. Por ser esse o nosso foco, entendemos os desafios que você enfrenta ao proporcionar um atendimento superior ao seu paciente em todas as fases do tratamento. Nosso serviço, desenvolvimento de tecnologia e do produto se direcionam a encontrar soluções para esses desafios, facilitando e tornando mais eficiente o tratamento em nível mais elevado.

Nossa categoria líder na ampla linha de produtos para Biópsia assegura que você sempre tenha o melhor produto para enfrentar o desafio sem a necessidade de firmar um compromisso. Você pode desfrutar os benefícios de uma parceria com fonte única, confiável, segura, sabendo que não importa qual produto Bard você escolheu, você está escolhendo o melhor nessa linha.

*Escolha sem compromisso*  
Soluções para Tratamento de Mama da Biópsia até a Terapia

**BARD**