

Produto de Uso Único – Proibido Reprocessar – Esterilizado por Óxido de Etileno

PATIENT-SET



Descrição: Conector para Ressonância Magnética e Tomografia Computadorizada, em PVC atóxico flexível, DEHP *Free*. Este conector pode ser acoplado a equipamentos de administração I.V., e em outras conexões utilizadas na administração de diferentes soluções contínuas e/ou intermitentes. Possui válvula antirrefluxo em policarbonato, com abertura por pressão; conector macho reversível e retrátil, em PVC atóxico e tampa protetora em polietileno de alta densidade. Produto suporta pressão de até 300 PSI. Estéril e apirógeno, a menos que a embalagem esteja danificada. Peça Única

Indicação: Para injeção de meios de contraste.

Modo de Uso: Com meios assépticos, abrir a embalagem. Acoplar o conector fêmea, localizado na extremidade superior da peça ao extensor; e o macho, extremidade inferior da peça, na via de acesso do paciente. Este procedimento deve ser realizado por profissional altamente especializado e treinado, para que possa manusear o produto adequadamente.

Cuidados e Advertências: O produto não apresenta nenhuma contra-indicação. São fabricados em PVC atóxico, isento de metal e livre de látex. Não interage com medicamento em nenhum momento. Proibido o uso de agulhas, ao preencher o conector com soro fisiológico ou contraste. Não utilizar o produto caso a embalagem esteja danificada. Verificar se as conexões estão bem fixas, antes de iniciar o uso.

Armazenamento: Temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

Descarte: Descartar o produto de acordo com os procedimentos padronizados no hospital ou clínica, para materiais potencialmente contaminados.

Precauções: Não utilizar após o prazo de validade.

Apresentação: Embalagem constituída de filme e papel grau cirúrgico na apresentação 20cm.